

# Sådan forbinder og overfører du data

Trådløs adapter



## Påsætning af Accu-Chek® Mobile trådløs adapter



1 Tag låget til **USB-porten** af Accu-Chek Mobile apparatet.



2 Sæt adapteren i USB-porten.




3 Aktiver **Bluetooth®** på din smartphone.




4 Tryk på knappen på adapteren. Det grønne LED-lys blinker hurtigt.

## Pardon Accu-Chek Mobile med mySugr appen

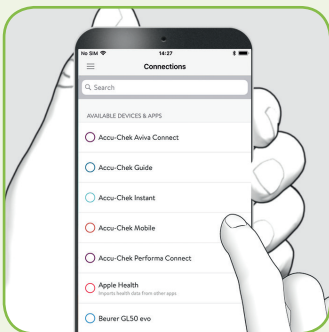

5 Åbn mySugr appen. Tryk på og derefter på **Forbindelser**. Vælg **Accu-Chek Mobile**, og tryk derefter på **Forbind nu**.

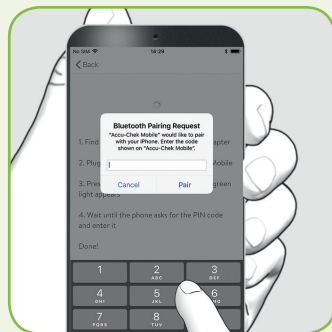

6 Indtast de **sidste seks cifre af adapterens serienummer** (findes på indersiden af adapteren samt på adapterræskan).



7 Dataoverførslen starter automatisk. Det grønne LED-lys blinker langsomt under overførslen. Når dataoverførslen er slut, stopper LED-lyset med at blinke og viser et konstant grønt lys. Adapteren slukker automatisk.



8 Mål dit blodsukker som normalt. Aktiver Bluetooth® på din smartphone. Tryk herefter på knappen på adapteren for at starte dataoverførsel. Det grønne LED-lys blinker hurtigt.

Du bliver automatisk opgraderet til **mySugr PRO**, når du overfører din første måling!

Download mySugr appen gratis



Roche Diagnostics A/S  
Industriholmen 59 · 2650 Hvidovre · Tlf.: 80 82 84 71  
[www.accu-chek.dk](http://www.accu-chek.dk)

ACCUCHEK®