
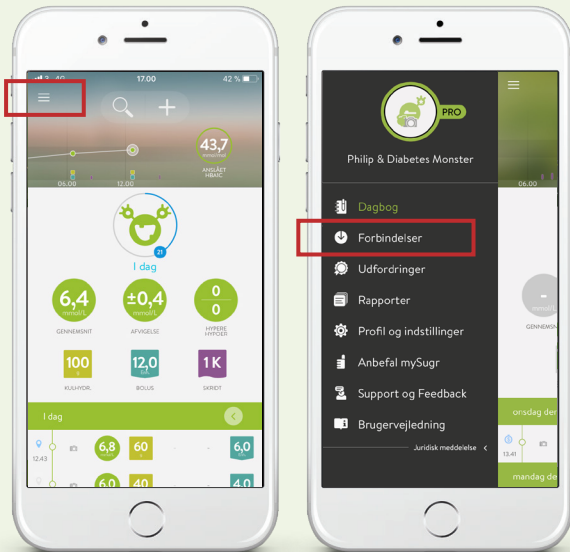
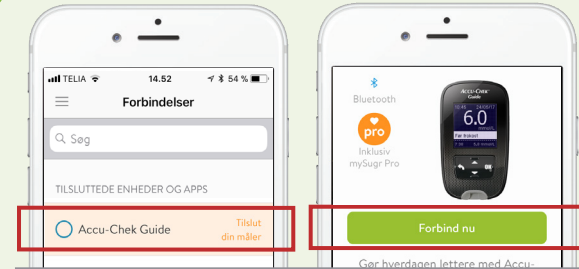


Kom igang med mySugr og Accu-Chek® Guide

- 1 Tænd Bluetooth  på din telefon. Se eventuelt under dens indstillinger.
- 2 Åbn sidemenuen i mySugr appen, og find **Forbindelser**.



- 3 Vælg Accu-Chek Guide, og klik på **Forbind nu**.



- 4 Tænd dit Accu-Chek Guide apparat, og gå ind i **Indstillinger**.
- 5 Vælg **Trådløs**, vælg **Pardannelse** og derefter **Pardan enhed**
- 6 Indtast koden, der vises på dit blodsukkerapparat, i din telefon, og bekræft forbindelsen.
- 7 Vend tilbage til **Trådløs** i dit blodsukkerapparats indstillinger, og vælg **Auto-Send** for at tillade automatisk trådløs overførsel af dine blodsukkertal til appen.

Du bliver automatisk opgraderet til **mySugr PRO**, når du overfører din første måling!



Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59 · 2650 Hvidovre · Tlf.: 80 82 84 71
www.accu-chek.dk

ACCUCHEK®